


Placa de Montaje Riel



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

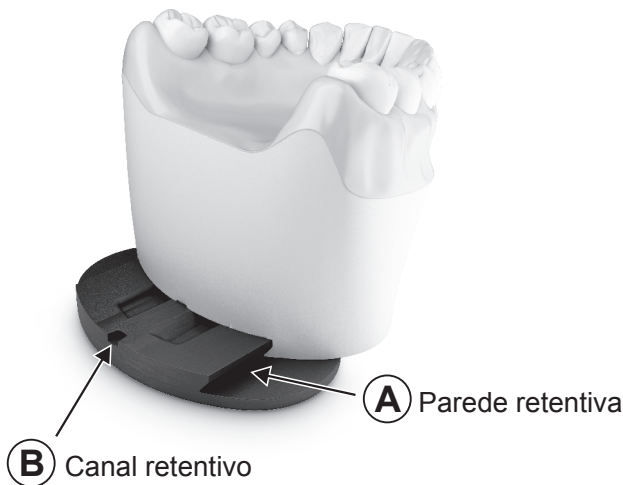

La Placa de Montaje Riel Bio-Art fue desarrollada especialmente para posibilitar la remoción del modelo de yeso sin la necesidad de romperlo, lo que ocurre con la mayoría de las placas de montaje convencionales.

Para un funcionamiento adecuado, se debe tomar algunos cuidados en el montaje y remoción del modelo, como sigue en el procedimiento:

1) Durante el montaje, ponga yeso relleno todo el espacio interno formado entre las paredes retentivas (A) y la base del diseño riel, garantizando una mejor retención del modelo;

2) El acabado del modelo en el borde lateral de la placa de montaje, deberá quedar libre de yeso en toda su extensión, para garantizar su desplazamiento y deslice durante la remoción;

3) Antes de la remoción del modelo, se debe remover el yeso del canal retentivo de la placa (B) utilizando alguna herramienta puntiaguda (ex.: Lecron). Este canal de retención tiene la función de evitar que el modelo de mueva espontáneamente de la placa durante el trabajo con el articulador;

4) Después de removido todo el yeso contenido en el canal de retención, se debe agarrar firmemente el modelo y aplicar un pequeño golpe en el borde de la placa en el sentido indicado por la señal localizada en la parte inferior de la placa.

Este procedimiento hará con que la placa se suelte del yeso y quede libre para deslizar fácilmente hacia fuera del modelo.

Obs.: Una vez removido el modelo de la placa de montaje riel, no garantizamos que al encajarlo nuevamente se tenga la misma precisión de la posición inicial de trabajo, una vez que esta depende totalmente de la calidad de los materiales utilizados en el proceso (yeso).

Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - CEP 13568-000

São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953 - www.bioart.com.br