



WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO LTD

MANUAL DE INSTRUCCIÓN – SELIN 2.0

INTRODUCCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la máquina de sellado, los tipos de seguridad y las instrucciones.

Este manual muestra las ventajas y la comodidad del usuario durante el uso.

Siga estrictamente las instrucciones de operación y mantenimiento de este Manual.

Si hay problemas de uso, póngase en contacto con Woson.

RIESGOS DE SEGURIDAD

1. Tenga cuidado al manipular la máquina de sellado, no fuerce demasiado los controles.
2. Cuando se usa la máquina, siempre está boca arriba, y está prohibido colocarla en un lado o en diagonal.
3. No arroje agua ni encienda la máquina.

RESUMEN DEL PRODUCTO

Rendimiento estable, diseño moderno, fácil de operar.

La operación correcta y segura garantiza al sellador una larga vida útil.

Tiene alarma de falla o errores de operación.

Su diseño proporciona un espacio acorde.

Se apaga automáticamente después de mucho tiempo sin operación.

No requiere montaje. Es un producto plug-and-play.

Guillotina construida con cuchilla de borde afilado con corte industrial de doble filo, precisa y suave, sin arrugas ni pliegues sobre papel de grado quirúrgico.

Producto robusto, hecho con estructura ABS de alto impacto, materia prima de primer nivel, con larga vida útil si se usa correctamente, según las instrucciones de fábrica.

FUNCIONAMIENTO DEL SELLADOR

La SELINA es un producto inteligente.

Una vez conectado a la red eléctrica, enciende la luz verde y comienza a parpadear indicando la calefacción durante unos 3 minutos.

Cuando la luz verde deja de parpadear, significa que se puede realizar el sellado.

Active la palanca de sellado durante unos 3 segundos.

Encender la luz amarilla significa que el sellado está listo.

Con el papel adherido, msobre la cuchilla suavemente, firme y continuamente, en la dirección izquierda-derecha o viceversa para cortar el papel de grado quirúrgico

El papel de grado quirúrgico debe ser transparente y éter hacia arriba.

El sistema de protección se activa automáticamente después de unos 30 minutos de inactividad.

Para volver al funcionamiento normal, reinicie el proceso, active la tecla general y espere a que la luz verde deje de parpadear.

Es un producto intuitivo y muy fácil de usar.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje y frecuencia: 220V o 110V 50Hz ~ 60Hz

Potencia: 100W

Temperatura de sellado: 200°C + - 10°C

Tramo máximo de sellado: 285 mm

Ancho de sellado: 12 mm

Peso neto: 4.2kg

Peso bruto: 4,8 kg

Dimensión del producto: L450 x P320 x A170mm

Dimensión del embalaje: L490 x P380 x A210mm

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Apague el equipo, use un paño suave ligeramente empapado en detergente neutro para limpiar la superficie del ABS.

El cuidado del líquido no penetra en ninguna circunstancia en el producto.

En caso de duda, póngase en contacto con su fabricante o distribuidor autorizado inmediatamente.

No desmonte y repare por mano de obra no autorizada, bajo pena de perder la garantía.

NINGBO JIANGBEI WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.

Dirección: No.25, Lane 300, Jinshan Road, Jiangbei District.
Ningbo, China - 315032

Contacto: +86 574 83022668

Correo electrónico: service@wosongroup.com